

# Беруши СТС-215 противошумные с пластиковым шнурком



## Инструкция по применению:



1. Возьмите берушу пальцами за ножку и поднесите к уху.
2. Оттяните ушную раковину вверх и назад, чтобы выпрямить слуховой канал, далее медленно и аккуратно вставьте вкладыш в наружный слуховой проход.
3. Придерживайте вкладыш пальцем в течение 10 секунд до его полного расправления внутри слухового прохода.
4. Рекомендуется расположить шнурок сзади на шее.

## Противопоказания:

- индивидуальная непереносимость материала.
- отиты, воспаления ушного канала.
- возраст младше 5 лет (для малышей необходимо приобретать детские беруши (модель ХН-1А)).

## Меры предосторожности:

- применять только по назначению, соблюдая инструкцию.
- дети младше 12 лет должны использовать беруши только под присмотром родителей.
- вынимать беруши необходимо медленно, резкое вынимание может привести к повреждениям органов слуха.

Беруши следует заменить, если они становятся твёрдыми, изношенными, деформированными. После использования утилизировать как бытовые отходы

## Срок использования не ограничен

Продукция соответствует требованиям ГОСТ 12.4.051-87, ГОСТ 12.4.275-2014 (EN 13819-1:2002).

Хранить в недоступном для детей месте, при относительной влажности воздуха не более 80%, на расстоянии не менее 1 метра от отопительных приборов и воздействия прямых солнечных лучей, и открытого огня.