

Беруши одноразовые из вспененного полиуретана



Инструкция по применению:

1. Скатайте вкладыш пальцами в плотный цилиндр.
2. Оттяните ушную раковину вверх и назад, чтобы выпрямить слуховой канал, далее круговыми движениями медленно вставьте вкладыш в наружный слуховой проход.
3. Придержите вкладыш пальцем в течение 30-40 секунд до его полного расправления внутри слухового прохода.

Противопоказания:

- индивидуальная непереносимость материала
- отиты, воспаления ушного канала
- возраст младше 5 лет. Для малышей необходимо приобретать детские беруши (модель ХН-1А).

Меры предосторожности:

- применять только по назначению, соблюдая инструкцию;
- дети младше 12 лет должны использовать беруши только под присмотром родителей;
- вынимать беруши необходимо медленно, аккуратно поворачивая вкладыш в разные стороны.

Не рекомендуется применять беруши повторно, а также в случае заметных загрязнений или повреждений (деформации).

Неправильное использование может вызвать травму слухового канала. В случае возникновения боли, дискомфорта немедленно извлеките беруши из ушей. При застревании вкладыша обратитесь к врачу для его удаления.

Срок годности в закрытой упаковке – 5 лет.

Беруши следует заменить, если они становятся твёрдыми, изношенными, деформированными. После использования утилизировать как бытовые отходы

Продукция соответствует требованиям ГОСТ 12.4.051-87, ГОСТ 12.4.275-2014 (EN 13819-1:2002). Хранить в недоступном для детей месте, при относительной влажности воздуха не более 80%, на расстоянии не менее 1 метра от отопительных приборов и воздействия прямых солнечных лучей, и открытого огня.