

Беруши низкочастотного шумоподавления с инновационным фильтром в металлическом кейсе



Инструкция по применению:

1. Возьмите берушу пальцами за ножку и поднесите к уху.
2. Оттяните ушную раковину вверх и назад, чтобы выпрямить слуховой канал, далее медленно и аккуратно вставьте вкладыш в наружный слуховой проход.
3. Придерживайте вкладыш пальцем в течение 10 секунд до его полного расправления внутри слухового прохода.

Противопоказания:

- индивидуальная непереносимость материала
- отиты, воспаления ушного канала
- возраст младше 5 лет (для малышек необходимо приобретать детские беруши (модель ХН-1А)).

Меры предосторожности:

- применять только по назначению, соблюдая инструкцию
- дети младше 12 лет должны использовать беруши только под присмотром родителей
- вынимать беруши необходимо медленно, резкое вынимание может привести к повреждениям органов слуха

Беруши следует заменить, если они становятся твёрдыми, изношенными, деформированными. После использования утилизировать как бытовые отходы

Срок использования не ограничен

Продукция соответствует требованиям ГОСТ 12.4.051-87, ГОСТ 12.4.275-2014 (EN 13819-1:2002).

Хранить в недоступном для детей месте, при относительной влажности воздуха не более 80%, на расстоянии не менее 1 метра от отопительных приборов и воздействия прямых солнечных лучей, и открытого огня.